

Anleitung zur Probennahme

Speicheltest Parodontitis (MMP-8)



? Ist Ihr Test-Paket vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Test-Paket vollständig ist.

Es sollte enthalten:

- 1 Anleitung zur Probennahme
- 1 Probenbegleitschein
- 1 Garantieschein
- 1 Speichelgefäß (Saliva)
- 1 Strohhalm
- 1 Etikett
- 1 Versandgefäß
- 1 blaue Versandtasche

*medivere GmbH
Hans-Böckler-Str. 109
55128 Mainz*

Telefon: 0900-54 75 266
*0,85 €/pro Minute aus
dem deutschen Festnetz;
die Preise aus dem Mobil-
funknetz können abweichen.*

* Test-Vorbereitung

Hormonanwendungen sollten mindestens 24 Stunden vor dem Speicheltest abgesetzt werden.

Am Tag der Probengewinnung sollten Sie Folgendes beachten:

1. den Speichel nicht mit Blut vermischen, z. B. durch Zahnfleischbluten
2. kein Mundwasser / keine Mundspülungen verwenden
3. direkt vor der Speichelprobe den Mut mit klarem Wasser spülen
4. Die Probengewinnung muss nüchtern erfolgen.
Bitte während der Probengewinnung weder essen noch trinken.
5. Probe nach der Probennahme im Kühlschrank aufbewahren

! Test-Durchführung

Die Speichelprobe sollten morgens nach dem Aufstehen gewonnen werden:

1. Geben Sie den Speichel durch den Strohhalm in das Speichelgefäß. Das Gefäß sollte mindestens **bis zur Hälfte** mit Speichel gefüllt sein (Schaum nicht mit messen).

Fortsetzung auf der Rückseite

Anleitung zur Probennahme Speicheltest Parodontitis (MMP-8)

Fortsetzung von Seite 1

2. Schließen Sie den Deckel des Speichelgefäßes sorgfältig.
3. Beschriften Sie das **Etikett** mit Datum, Uhrzeit und Namen und kleben Sie es auf das Speichelgefäß.
4. Stecken Sie das Speichelgefäß in das beiliegende Versandgefäß. Bewahren Sie dieses bis zum Versand im **Kühlschrank** auf.
5. Entsorgen Sie bitte den Strohhalm in Ihrem Hausmüll.
6. Das Versandgefäß mit der Speichelprobe legen Sie mit dem ausgefüllten Probenbegleitschein in die beiliegende blaue Versandtasche und senden diese kostenfrei an unser Labor zurück.

Der Versand sollte vorzugsweise von Montag bis Donnerstag, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr medivere:diagnostics-Team