

Anleitung zur Probennahme

Urintest Hämopyrrol

Ist Ihr Test-Paket vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Test-Paket vollständig ist.

Es sollte enthalten:

- 1 Anleitung zur Probennahme
- 1 Anleitung zur Befundabfrage
- 1 Probenbegleitschein
- 1 Garantieschein
- 1 braunes Spezial-Röhrchen inkl. Etikett
- 1 Urinbecher
- 1 Pipette
- 1 Versandgefäß
- 1 blaue Versandtasche

Test-Vorbereitung

1. Bitte 7 Tage vor Probennahme Vitamin B6- und Zink-Präparate absetzen.
2. Wichtiger Hinweis für Frauen: Bitte sammeln Sie keinen Urin während Ihrer Periode.

Test-Durchführung

Bitte beachten:

Sollten Sie öfter in der Nacht Wasser lassen müssen, so muss der Urin gesammelt werden.

Entsprechende Sammelbehälter können Sie gerne anfordern unter Tel. 0 61 31 – 72 05 216.

Sammeln Sie dann die nächtliche Harnproduktion ab 24 Uhr und mischen ihn mit dem ersten Morgenurin nach dem Aufstehen. Aus dem gesammelten Urin entnehmen Sie dann bitte die benötigte Urinmenge mittels Pipette (siehe Test-Durchführung).

1. Die Bestimmung des **Parameters Hämopyrrol** erfolgt aus dem **Morgenurin**. Verwenden Sie bitte für die Urinprobe den **Mittelstrahlurin**: Verwerfen Sie zuerst etwas Urin in die Toilette; den folgenden Urin füllen Sie in den **Urinbecher**.
2. Öffnen Sie den Schraubverschluss des braunen Spezial-Röhrchens und füllen Sie mit der Pipette einen Teil des Urins aus dem Urinbecher in das Röhrchen. Dieses sollte **vollständig gefüllt** sein (mindestens 2 Pipetten Urin). **Achten Sie bitte darauf**, dass das Röhrchen zwei Öffnungen aufweist. Nur an der richtigen Öffnung finden Sie ein Gewinde für den Schraubverschluss.
3. Schwenken Sie das Röhrchen 5x um 180°.
4. Füllen Sie das beiliegende **Etikett** (Proben-Datum, Name) aus und kleben dieses auf das Urin-Röhrchen.
5. Stecken Sie dieses in das Versandgefäß.
6. Den Urinbecher und die Pipette entsorgen Sie bitte mit Ihrem Hausmüll.

7. Legen Sie das Versandgefäß zusammen mit dem ausgefüllten Probenbegleitschein in die beiliegende blaue Versandtasche und senden Sie diese per Post an unser Labor zurück.

Der Versand sollte von Montag bis Donnerstag, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!
Ihr medivere-Team



*medivere GmbH
Hans-Böckler-Str. 109
55128 Mainz*

Telefon: 06131 7205-216