

# Anleitung zur Probennahme

## Vitamincheck Haare

**VERLETZUNGSGEFAHR!**  
Bitte das Testpaket für Kinder und Jugendliche unzugänglich aufbewahren.

### Ist Ihr Test-Paket vollständig?

Bitte überprüfen Sie zunächst, ob Ihr Test-Paket vollständig ist. Es sollte enthalten:

- 1 Anleitung zur Probengewinnung
- 1 Anleitung zur Befundabfrage
- 1 Probenbegleitschein
- 1 Garantieschein
- 1 Konsiliarschein (s. Rückseite)
- 1 Heparin Röhrchen
- 1 EDTA Röhrchen
- 1 Serum Röhrchen
- 1 Butterfly Blutentnahmesystem
- 1 Blutentnahmeadapter
- 3 Versandgefäße
- 1 blaue Versandtasche

### Test-Durchführung

Sehr geehrte Damen und Herren,

für den Vitamincheck Haare und dessen labormedizinische Auswertung ist eine venöse Blutentnahme notwendig. Bitte gehen Sie hierfür zu einem Therapeuten Ihres Vertrauens. Legen Sie dort Ihr Testpaket vor und bitten Sie um eine Blutentnahme mit den beigelegten Materialien. Damit Ihrem Therapeuten/Ihrer Therapeutin keine Kosten entstehen, haben wir Ihrem Testpaket einen Konsiliarschein bzw. eine ärztliche Liquidation beigelegt. Diesen Schein händigen Sie bitte Ihrem Therapeuten aus, damit die Kosten mit uns abgerechnet werden können.

Falls Sie von keinem Therapeuten betreut werden, finden Sie unter [www.medivere.de](http://www.medivere.de) unter dem Reiter „Gesundheitsexperten und Foren“ eine Auflistung von Therapeuten in Ihrer Nähe.

**Wichtig:** Damit eine Auswertung aller Parameter durchgeführt werden kann, achten Sie bitte darauf, dass alle beigelegten Blutentnahmeröhrchen mit Blut gefüllt werden.

Nach der Blutentnahme nehmen Sie oder das Praxisteam die Barcode-Etiketten vom Probenbegleitschein und kleben diese auf die Blutentnahmeröhrchen. Danach geben Sie die Blutentnahmeröhrchen in die beiliegenden Versandgefäße, welche Sie dann bitte zusammen mit dem ausgefüllten Probenbegleitschein in die beiliegende blaue Versandtasche legen. Senden Sie diese **umgehend** an unser Labor zurück.

Der Versand sollte von Montag bis Donnerstag, nicht zum Wochenende oder vor Feiertagen erfolgen.

Vielen Dank für Ihre Mithilfe!  
Ihr medivere-Team



medivere GmbH  
Hans-Böckler-Str. 109  
55128 Mainz

Telefon: 06131 7205-216

Praxisstempel

**Faxantwort: 06131-7205-100**

medivere GmbH  
Hans-Böckler-Str. 109  
55128 Mainz

Sehr geehrte Frau Doktor, sehr geehrter Herr Doktor,

vielen Dank für Ihre Bereitschaft, eine Blutentnahme für unseren Kunden durchzuführen.

Wir bitten Sie, Ihre Leistungen direkt mit uns abzurechnen und dieses Schreiben ausgefüllt an uns zurückzusenden. Damit wir einen reibungslosen Ablauf gewährleisten können, bitten wir Sie, alle rot gekennzeichneten Felder vollständig auszufüllen.

Mit freundlichen Grüßen  
Ihr medivere-Team

## Ärztliche Liquidation

Barcode-Etikett

**Rechnungsnr.:**

Für meine ärztlichen Leistungen erlaube ich mir, folgende Positionen in Rechnung zu stellen:

Art der ärztlichen Leistung	GOÄ-Ziffer, Faktor	Abrechnungsbetrag
Blutentnahme	1 (Faktor 2,3), 250 (Faktor 1,8)	<b>€ 14,95</b>

Die Leistungen sind nach § 4 Nr. 14 a i.V. mit § 4 Nr. 14 b) bb) UStG steuerfrei.

Bitte überweisen Sie o. g. Betrag auf folgendes Konto:

Kontoinhaber:

Kreditinstitut:

BIC:

IBAN:

Mit freundlichen Grüßen

Datum, Unterschrift